

의료기기 전안부촬영장치 매뉴얼 (MediCAM2, MediCAM-eye)

(주)컴아트시스템

서울시 금천구 가산디지털 2로 53 907 호 (가산동, 한라시그마밸리) #08588
Tel) 070-7122-2300 | Fax) 02-6305-5671
메디칼 사업부 / 부장 송석봉 010-8762-7985



1. 메인 메뉴

아래의 OSD 스위치를 2~3초 가량 누릅니다.





- 1. OSD Switch
- 2. Power LED
- 3. DC IRIS Jack
- 4. HD-SDI Output
- 5. Main Cable Terminal

다음과 기본 메인 메뉴가 나타납니다.

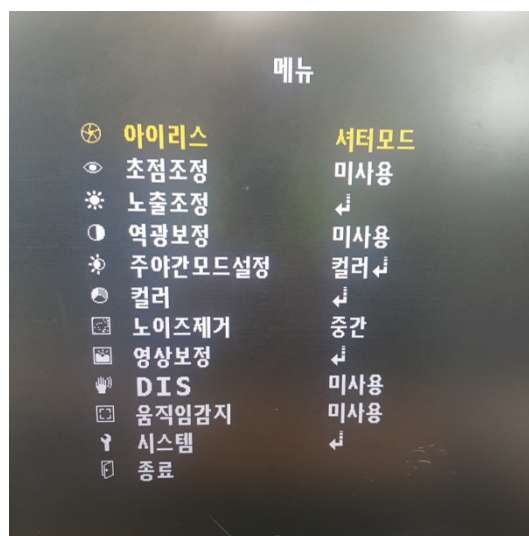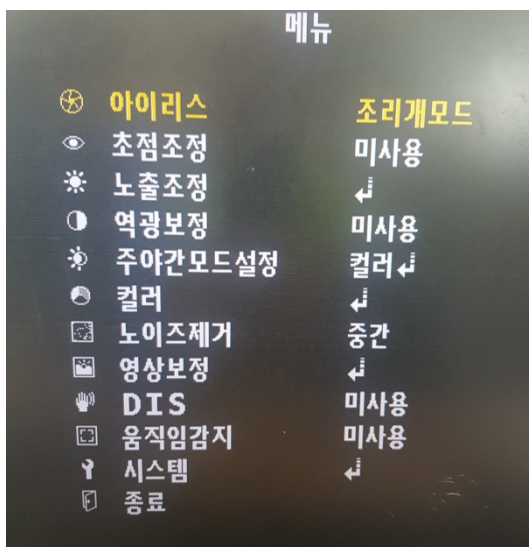



1-1. 아이리스 항목을 조리개모드 -> 셔터모드로 변경합니다.

2. 역광보정

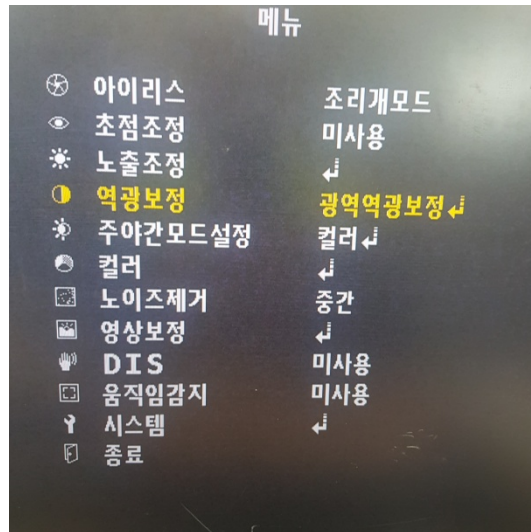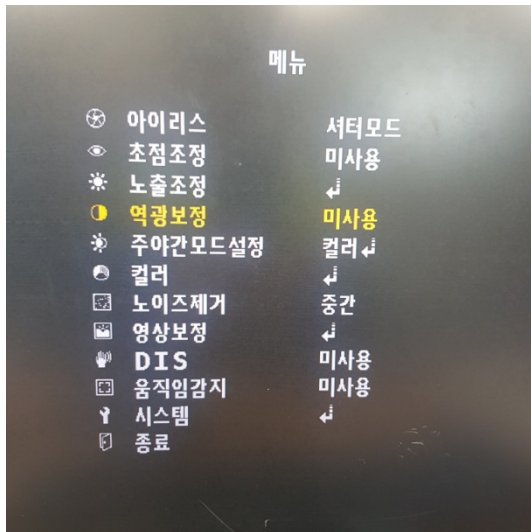


- 2-1. 역광보정 항목을 **미사용**에서 **광역역광보정**으로 변경합니다.
- 2-2. 복귀합니다.

3. 주야간 모드 설정

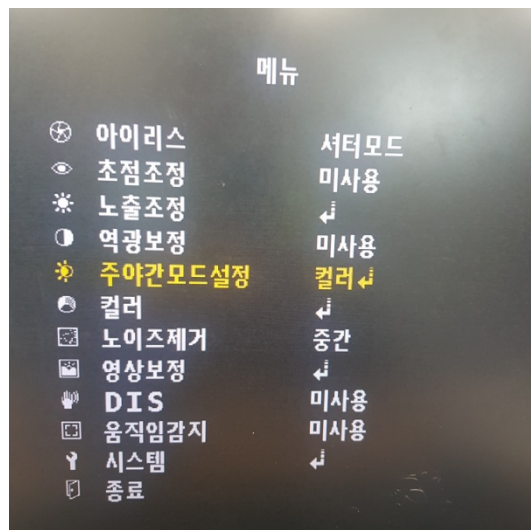
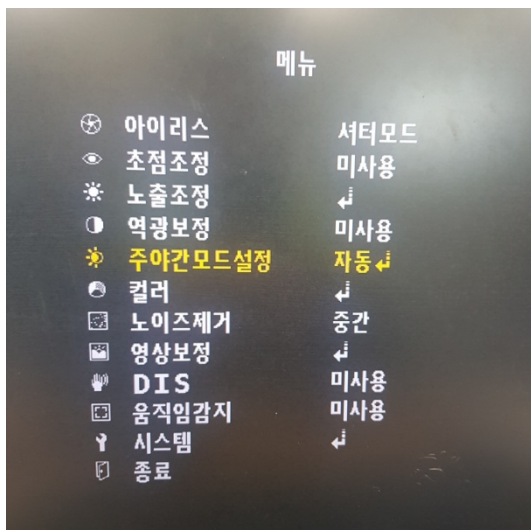


- 3-1. 주야간모드 항목을 **자동**에서 **컬러**로 변경합니다.

4. 컬러

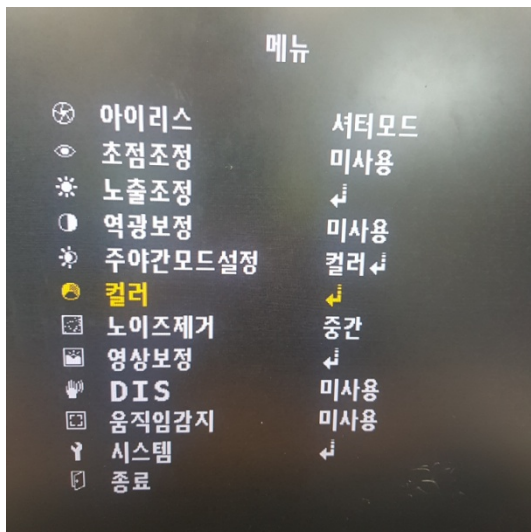

4-1. 컬러 항목에서 세부 설정으로 이동합니다.

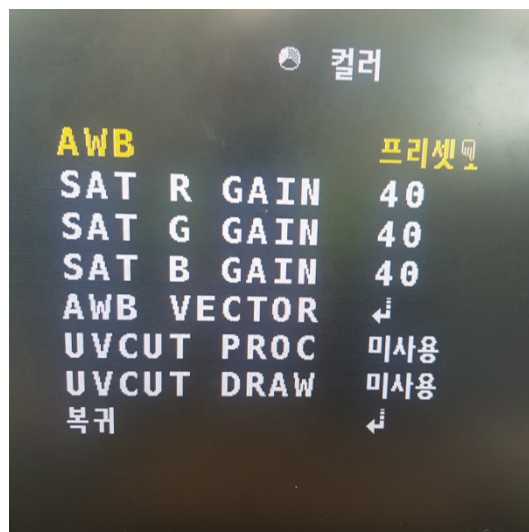
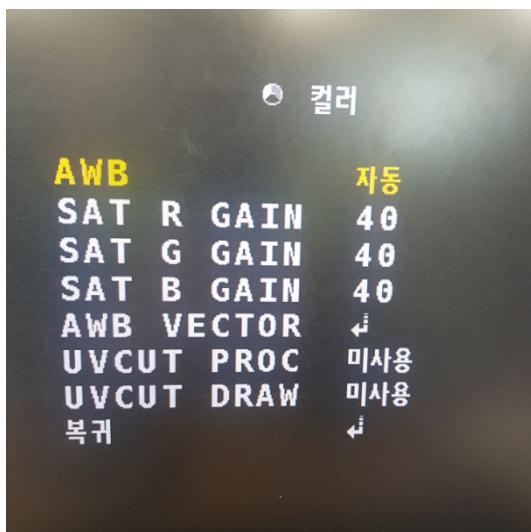


4-2. AWB 항목에서 자동을 프리셋으로 변경합니다.

이때 CBL 렌즈를 이용하여 컬러를 보정합니다.


4-3. 복귀합니다.

5. 노이즈

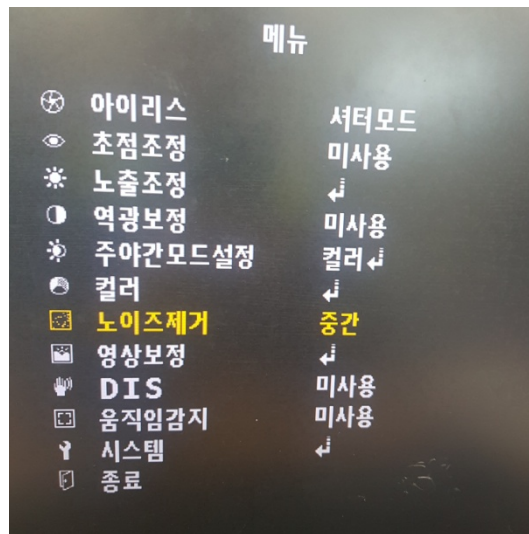
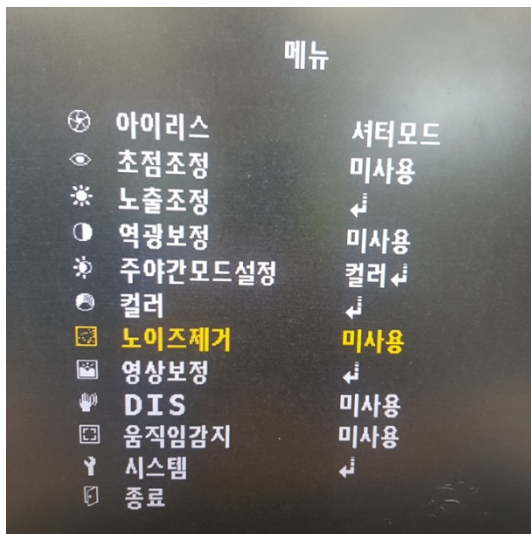


5-1. 노이즈 모드 항목을 **미사용**에서 **중간**으로 변경합니다.

6. 영상보정

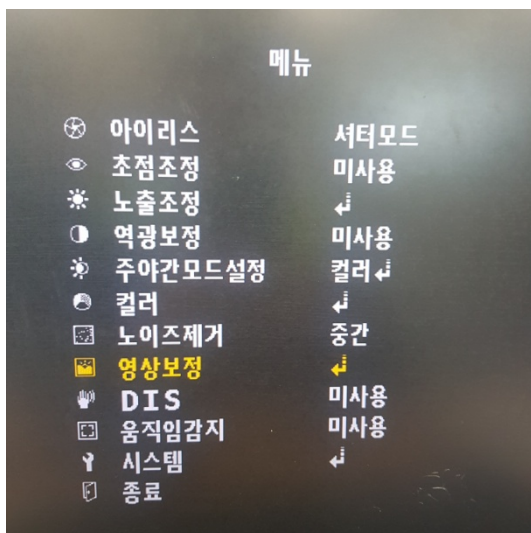

6-1. 컬러 항목에서 세부 설정으로 이동합니다.

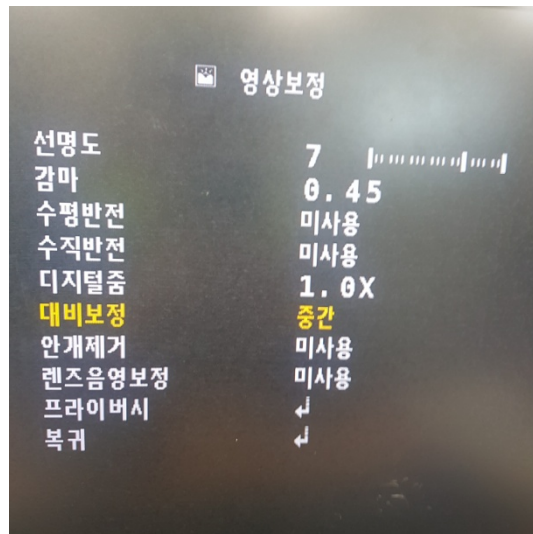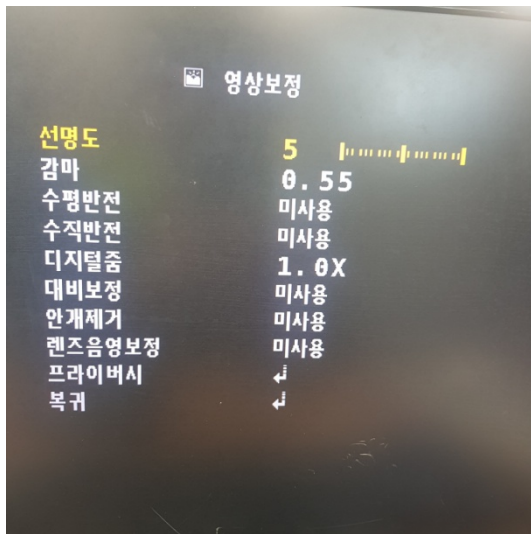


6-1. 영상보정 모드 항목을

6-2 선명도 5에서 7로 변경합니다.

6-3. 감마를 0.55에서 0.45로 변경합니다.

6-4. 대비보정 미사용에서 중간으로 변경합니다.

7. 저장하기

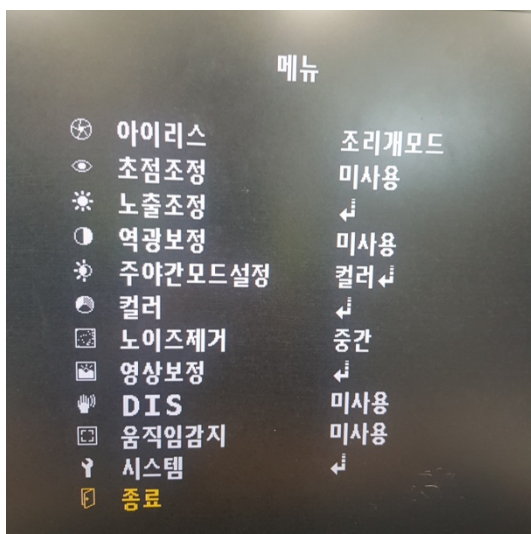

7-1. OSD 스위치를 눌러서 메뉴가 사라지면 설정값이 저장됩니다.